


Gäller för: Västernorrlands kommuner i samverkan 		Vårdhygienrutin Disk- och spoldesinfektor	
Godkänt av MAS i: Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik		Skapad av: Hygiensjuksköterskor i samråd med ansvarig hygienläkare i Region Västernorrland	
Fastställt: 180109	Giltigt tom: 231201	Reviderat: 211130	Sida: 1 av 5

Bakgrund

Desinfektion kan ske med fysikaliska eller med kemiska metoder. Värmedesinfektion används i första hand och kan användas för flertalet instrument och gods. Om diskdesinfektor saknas, se alternativa metoder i Vårdhandboken, i kapitel ”Desinfektion”.

Ansvarsfördelning

Verksamheten ansvarar för att kontroller av maskiner genomförs enligt standard SS EN ISO 15883 och Teknisk rapport SIS-TR 46:2014.

Respektive verksamhetschef ansvarar för att personalen får utbildning när det gäller desinfektionsutrustningens skötsel, handhavande av gods samt att regelbundna egenkontroller utförs. Det ska finnas en loggbok för varje desinfektor, med innehåll enligt standard. Vårdhygien ansvarar för revision av de länsgemensamma rutinerna samt medverkar i utbildning efter önskemål.

Förebyggande arbete

Dagliga kontroller/veckokontroller utförs av verksamhetens egen personal. Validering utförs vid nyinstallationer och vid förflyttning av maskinen. Förebyggande underhåll och upprepad processkontroll utförs årligen enligt avtal med tekniker/företag.

Användningsområde


Spol- och diskdesinfektorer är avsedda för rengöring och desinfektion av flergångsartiklar som tål minst 90° C. Smutsiga instrument och gods bör rengöras och desinfekteras så snart som möjligt för att undvika att smutsen torkar fast och skadar instrumenten.

- Instrument får enbart köras i diskdesinfektor.
- Porösa material ska inte köras i maskin eftersom värmefördelningen blir ojämn i dessa material och det ger en dålig desinfektion.
- Rostiga material eller material som kan rosta får inte köras i desinfektor eftersom rost kan föras över mellan instrument och maskin.
- Fyll maskinen enligt tillverkarens packschema, vid felaktig packning blir inte instrument och gods rena.

Olika typer av desinfektionsapparaturer

Spoldesinfektor har en utslagsfunktion, jämförbar med toalett, och är avsedd för rengöring och värmedesinfektion av urinflaskor, bäcken och sugflaskor (tvättfat se nedan).

Maskinen har ofta en spolningsfunktion, randspolning. Grovrengöring sker med kallt vatten, därefter spolning av varmt vatten med diskmedel, desinfektion med het ånga 90° ca en minut. Program med diskmedel ska alltid användas.

Gäller för: Västernorrlands kommuner i samverkan 		Vårdhygienrutin Disk- och spoldesinfektor	
Fastställt: 180109	Giltigt tom: 231201	Reviderat: 211130	Sida: 2 av 5

Diskdesinfektor saknar utslagsfunktion. Maskinen arbetar med cirkulerande vatten i olika disk- och sköljfaser. Nytt vatten tas in vid varje ny fas. Desinfektion sker med 90° vatten i minst en minut och ger efter diskning höggradigt rent gods. Använd torkprogram om det finns.

Veckokontroller

Utförs enligt checklista för respektive desinfektor. Sällan använda desinfektorer körs minst en gång per vecka och t.ex. efter semester.

Hantering vid rengöring och desinfektion

Arbeta med ren och oren sida i desinfektionsrummet.

För hantering och förvaring av rent gods, se Vårdhandboken ” Ren och steril rutin utanför operationsenheten”.

Före rengöring och desinfektion

- Öppna luckan, desinfektera händerna.
- Använd skyddsutrustning; skydda arbetsdräkten från stänk och använd handskar.
- Placera gods i maskinen enligt tillverkarens packschema, öppna instrument som t.ex. peanger och saxar.
- Desinfektera händerna. Använd rätt program för det gods som ska rengöras.

Efter rengöring och desinfektion

- Desinfektera så att det finns en ren yta att lägga det rena godset på.
- Öppna luckan, desinfektera händerna. Tänk alltid rena händer på rent gods.
- Kontrollera att de körda instrumenten och godset ser rent ut, om ej kontrollera maskinen enligt checklista och diska om. Om problemen kvarstår efter omdiskning görs felanmälan.
- Förvara rena instrument och gods i avsett förråd.

Tvättfat

Rengörs och desinfekteras:

- I första hand i diskdesinfektor.
- Om diskdesinfektor saknas:
Rengör tvättfatet med borste, rengöringsmedel och vatten, därefter desinfektion med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid.
- Om tvättfatet lämnas kvar i vårdtagarens lägenhet:
Rengör med rengöringsmedel och vatten efter användning därefter desinfektion med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid.

Felanmälan

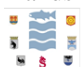
Kontakta reparatör enligt avtal och fyll i reparationsrapport.

Relaterade dokument

Desinfektionsapparat, Vårdhandboken

Desinfektion, Vårdhandboken

Ren och steril rutin utanför operationsenheten, Vårdhandboken

Gäller för: Västernorrlands kommuner i samverkan 		Vårdhygienrutin Disk- och spoldesinfektor	
Fastställt: 180109	Giltigt tom: 231201	Reviderat: 211130	Sida: 3 av 5

Checklista veckokontroll av spoldesinfektor

Maskinnr: _____


Kontrollera:

- tid, temperatur alt. markering som visar godkänd process
- att avloppet är fritt från skräp
- att munstycken och spolhåll (dysor) är rena och att rörliga spolmunstycken roterar
- att packning/list är hel och ren
- att rimlig mängd diskmedel gått åt (sätt streck och datum på dunken, jämför nivå)
- kammaren rengörs vid behov
- om maskinen sällan används ska den köras i samband med veckokontrollen
- signera kontrollerna här nedan

År: _____

Vecka	Datum	Ev. åtgärder	Vecka	Datum	Ev. åtgärder	Vecka	Datum	Ev. åtgärder
1			19			37		
2			20			38		
3			21			39		
4			22			40		
5			23			41		
6			24			42		
7			25			43		
8			26			44		
9			27			45		
10			28			46		
11			29			47		
12			30			48		
13			31			49		
14			32			50		
15			33			51		
16			34			52		
17			35			53		
18			36					

/Sparas i loggbok 3 år/

Gäller för: Västernorrlands kommuner i samverkan 		Vårdhygienrutin Disk- och spoldesinfektor	
Fastställt: 180109	Giltigt tom: 231201	Reviderat: 211130	Sida: 4 av 5

Checklista veckokontroll av diskdesinfektor

- Maskinnr: _____


Kontrollera:

- tid, temperatur alt. markering som visar godkänd process
- att spolarmarna snurrar, sitter rätt och att inga hål är igentäppta
- spolarmarna lossas och rengörs vid behov
- att silen/silarna är fria från skräp, rengörs vid behov
- att packning/list är hel och ren
- att rimlig mängd diskmedel/sköljmedel gått åt (sätt streck och datum på dunken, jämför nivå)
- kammaren rengörs vid behov
- om maskinen sällan används ska den köras i samband med veckokontrollen
- signera kontrollerna här nedan

År: _____

Vecka	Datum	Ev. åtgärder	Vecka	Datum	Ev. åtgärder	Vecka	Datum	Ev. åtgärder
1			19			37		
2			20			38		
3			21			39		
4			22			40		
5			23			41		
6			24			42		
7			25			43		
8			26			44		
9			27			45		
10			28			46		
11			29			47		
12			30			48		
13			31			49		
14			32			50		
15			33			51		
16			34			52		
17			35			53		
18			36					

/Sparas i loggbok i 3 år/

Gäller för: Västernorrlands kommuner i samverkan 		Vårdhygienrutin Disk- och spoldesinfektor	
Fastställt: 180109	Giltigt tom: 231201	Reviderat: 211130	Sida: 5 av 5

Reparationsrapport

Maskin nr: _____

Datum: _____

Vilket fel: _____

Felanmäld av: _____

Åtgärd: _____

Rengöringstest: _____

Arbetet utfört av: _____

/Sparas i loggbok i 3 år/
