

Disk och spoldesinfektorer

Mikrobiologiska renhetsgrader

- Rena produkter, ”fabriksrent”
- Höggradigt rena produkter – fria från sjukdomsalstrande mikroorganismer (instrument, rondskålar, saxar, ”flergångs-set”)
- Sterila produkter – alla mikroorganismer avdödade

Rengöring och desinfektion

1. Rengöring

2. Desinfektion: reducerar mikroorganismer till en nivå som inte innebär någon risk för smitta eller överföring av smitta

- Värmedesinfektion
- Kemisk desinfektion

Att tänka på

1. Utrustning tål värmedesinfektion
2. Tåla upphandlade godkända desinfektionsmedel i Sverige

Om utrustning behöver sköljas efter kemisk desinfektion, använd sterilt vatten till andningsutrustning (risk för legionella)

Spoldesinfektor

- Öppet avlopp
- Utslagsfunktion
- Kort process: spolar och desinfekterar
- Urinflaskor, bäcken, sugflaskor, hinkar mm
- Tillbehör: insatser för rätt placering av godset



Spoldesinfektor

- Avspolningsfas
- Diskfas med diskmedel, via dysor
- Sköljfas
- Desinfektion med ånga
- Programtid 5-10 minuter

Diskdesinfektor

- Har inte någon utslagsfunktion (ej spolningsbar)
- Diskar och desinfekterar
- Olika programval för typ av gods (gummi, rostfritt)
- Rörformiga instrument behöver korgar med genomspolsfunktion

Diskdesinfektor

- Sköljfas
- Diskfas med diskmedel
- Sköljfas med sköljmedel
- Desinfektionsfas $>90\text{ }^{\circ}\text{C}$, 1 minut
- Torkfas
- Programtid ca 1 timme



Kontroller

Vid installation av maskin (nyinköp/flytt). Leverantör

Validering (installationskontroll: IQ, funktionskontroll: OQ, processkontroll: PQ)

Varje år. Behörig tekniker

Upprepad processkontroll (UPQ).

Förebyggande underhåll-ingår det?

Varje dag/vecka. Vårdpersonal

Rutinkontroll efter varje körning

Veckokontroll enligt schema

Risker

- Fel/inget medel används
- Felpackat
- Överlastat
- Material som inte tål värme
- Rostiga instrument
- Förvaring
- Hantering



Desinfektionsrummet





Gäller för: Västernorrlands kommuner i samverkan 		Vårdhygienrutin Disk- och <u>spoldesinfektor</u>	
Fastställt: <u>180109</u>	Giltigt tom: <u>251130</u>	Reviderat: <u>231201</u>	Sida: 3 av 6

- ***Tvättfat***
- Rengörs och desinfekteras:
- I första hand i diskdesinfektor
- I andra hand rengörs tvättfatet med borste, rengöringsmedel och vatten, därefter Ytdesinfektion Plus
- I tredje hand rengörs tvättfatet om de lämnas kvar i vårdtagarens lägenhet med rengöringsmedel och vatten efter användning därefter desinfektion med Ytdesinfektion Plus

Medicinsk tekniska produkter

- Vårdgivaren är ansvarig för att personalen har kunskap av medicintekniska produkter som används inom vård och omsorg. Vårdgivaren ansvarar för att det i kvalitetssystem anges vem som har ansvaret för hur och av vem medicintekniska produkter får användas.

Enligt MDD är desinfektionsutrustning en medicinsktekniskt produkt.

Några funderingar

- Hur är ansvaret fördelat avseende disk-och spoldesinfektorer i kommunal verksamhet?
- Flergångs/engångsutrustning
- Rena respektive sterila rutiner
- Hantering av rena rutiner
- Förråd-hantering av förpackningar