

**Vård och
omsorgsförvaltningen**

Godkänd: Annika Eriksson Verksamhetschef Hälsa- och sjukvård.	Löpnr.: <n>	Dokumentklass Rutin	Version: <n.n>	Sida 1(5)
Författare: Monica Hillvall enhetschef Drift teknik och service, Katarina Funseth Medicinskt ansvarig för Rehabilitering MAR			Datum: 2021-04- 26	

Periodisk besiktning och kontroller av personlyftar

1 Inledning

Sundsvalls kommuns personlyftar inom Vård och Omsorgsförvaltningen (VoF), Individ och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF) och Barn och utbildningsförvaltningen besiktigas varje år av enheten för Drift teknik och service som är organisatoriskt placerad under avdelningen för kvalitet och utveckling, VoF och IAF:s gemensamma verksamhetsstöd.

Kompetens och utbildning

De personer som utför den årliga besiktningen och sköter underhåll av kommunens personlyftar har dels serviceutbildning som leverantören tillhandahåller och dels Hjälpmedelcentrums utbildning "Besiktning och funktion – personlyftar och vårdsängar". Den utbildningen vänder sig till hjälpmedelstekniker och personal som utför besiktningar i sitt uppdrag och bör genomgå var femte år.

De som gör månadskontrollerna är omvårdnadspersonal med speciell ergonomicoachutbildning som tillhandahålls av kommunhälsan.

De dagliga kontrollerna görs av personal på enheten som använder personlyften.

2 Syfte

Syftet med denna rutin är att följa de lagkrav som ställs på verksamheter som nyttjar personlyftar. Målet är att säkerställa kvalitet och patientsäkerheten på varje enhet. Rutinen tydliggör även ansvarsfördelning.

Vård och omsorgsförvaltningen

Godkänd: Annika Eriksson Verksamhetschef Hälsa- och sjukvård.	Löpnr.: <n>	Dokumentklass Rutin	Version: <n.n>	Sida 2(5)
Författare: Monica Hillvall enhetschef Drift teknik och service, Katarina Funseth Medicinskt ansvarig för Rehabilitering MAR			Datum: 2021-04-26	

3 Beskrivning


Ansvarsfördelning

Ansvarig för att utföra den årliga besiktningen av kommunens personlyftar är Vård och omsorgsförvaltningens servicetekniker. Uppföljningsansvarig är enhetschef för serviceteknikerna.

De mobila personlyftarna som föreskrivs och hyrs av Hjälpmedel Västernorrland ansvarar Hjälpmedel Västernorrland för besiktningarna. Föreskrivning av personlyft följs upp av ansvarig föreskrivare.

Årlig besiktning

För att veta vilken som ansvarar för årlig besiktning så är kommunens personlyftar uppmärkta med Sundsvalls kommun logga och serviceteknikerna ansvarar för den årliga besiktningen. Hjälpmedel Västernorrland personlyftar har ett individnummer som står skrivet på en grön lapp där Hjälpmedel Västernorrland är ansvarig för den årliga besiktningen.

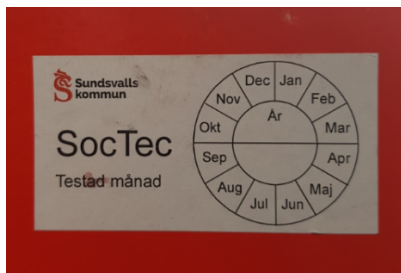

Exempel kommunens märkning



Exempel Hjälpmedel Västernorrlands märkning

Månadskontroll

Ansvarig för att utföra månadskontrollen av enhetens stationära och mobila personlyftar som kommunen äger är hjälpmedelsombud/ergonomicoacher. Ansvarig i ordinärt boende är ergonomicoach/kontaktperson. För verksamheter i andra förvaltningar utses ansvarig person av enhetschef. Uppföljningsansvarig för att månadskontrollerna utförs är enhetschef och finns beskrivet i den lokala rutinen för medicinteknisk utrustning på enheten.

**Vård och
omsorgsförvaltningen**

Godkänd: Annika Eriksson Verksamhetschef Hälso- och sjukvård.	Löpnr.: <n>	Dokumentklass Rutin	Version: <n.n>	Sida 3(5)
Författare: Monica Hillvall enhetschef Drift teknik och service, Katarina Funseth Medicinskt ansvarig för Rehabilitering MAR			Datum: 2021-04- 26	

Daglig kontroll

Daglig kontroll ansvarar och utförs av personalen i samband med det dagliga användandet. I ordinärt boende har brukaransvaret tydliggjorts genom att brukaren/företrädare skall omedelbart ta kontakt med föreskrivare om man misstänker att det är något fel på personlyften.

Uppföljningsansvar finns beskrivet i den lokala rutinen för medicinteknisk utrustning på enheten.

Utförande**Årlig besiktning**

- Besiktningen av alla personlyftar finns planerade på årsbasis och Drift teknik och service planerar med ansvarig chef när besiktningen skall genomföras.
- Enheten förbereder då genom att t.ex plocka undan på rummen.
- Besiktningen utför enligt Hjälpmedelcentrums:s besiktningsunderlag på alla skenor, infästningar, lyftblock och mobila personlyftar. Bilaga 1
- Eventuellt reparationer/underhåll utförs
- Återkoppling sker till ansvarig för enheten när besiktningen är utförd.

Månadskontroller

Utförs av ergonomicoacher

- Personlyftens bärande konstruktion, ska vara hela, rena och fria från yttre skador.
- Lyftorgan/block med infästningar, ska vara hela, rena och fria från yttre skador.
- Lyftbandet kontrolleras så att det ej är slitet och att det ej är vridet eller veckat.

Vård och omsorgsförvaltningen

Godkänd: Annika Eriksson Verksamhetschef Hälso- och sjukvård.	Löpnr.: <n>	Dokumentklass Rutin	Version: <n.n>	Sida 4(5)
Författare: Monica Hillvall enhetschef Drift teknik och service, Katarina Funseth Medicinskt ansvarig för Rehabilitering MAR			Datum: 2021-04-26	

- Skyddsanordningar, att avkrokningskydd finns.
- Lyftomfång, att lyften går upp och ner i rätt förhållande till lyfthöjder.
- Nödsänkningen, att den fungerar.

Signeringslista för kontroll av fasta och mobila personlyftar fylls i med uppgifterna datum, signatur, eventuell anmärkning. Vid eventuella brister får personlyften ej brukas förrän bristen är åtgärdad. När eventuell åtgärd utförts ifylls datum, åtgärd samt signatur.

Instruktion daglig kontroll

Vid användning av personlyft skall man som personal vara väl förtrogen med hur personlyften används

- *lyssna efter missljud*
- *vid användning av elektrisk personlyft skall batterierna laddas kontinuerligt*
- *kontrollera om det är glapp i lyftarm och mast*
- *när det gäller mobila personlyftar skall de rörliga delarna - särskilt hjulen - hållas rena. Hjulen skall rulla lätt.*
- *Obs! hjulen skall endast låsas då man lyfter en person från golvet.*
- *Notera i signeringslistan ev. driftsstörningar, olyckstillbud o dyl. för varje specifik personlyft. Detta är värdefullt för den som utför den årliga kontrollen.*
- *Vid användning av personlyft, kontrollera att selen är rätt placerad*
- *När det gäller lyftselar så påverkas kvalitén av faktorer som: personens vikt, antal förflyttningar per dag, hur ofta lyftselen tvättas m.m. Därför skall följande punkter regelbundet kontrolleras:*
 - *kantband (fållar)*
 - *tyg (hål, revor och tunnslitna ställen)*
 - *band*
 - *förstärkningar*
 - *sömmar (lösa trådar)*

4 Referenser

Läkemedelsverkets föreskrift LVFS 2003:11

**Vård och
omsorgsförvaltningen**

Godkänd: Annika Eriksson Verksamhetschef Hälsa- och sjukvård.	Löpnr.: <n>	Dokumentklass Rutin	Version: <n.n>	Sida 5(5)
Författare: Monica Hillvall enhetschef Drift teknik och service, Katarina Funseth Medicinskt ansvarig för Rehabilitering MAR			Datum: 2021-04- 26	

EU:s förordning om medicintekniska produkter MDR 2017/745

SS-EN ISO 10535:2006 "Lyftar för personer med funktionshinder"

SS-EN ISO 10535:2007

[SOSFS 2008:1](#)